




# Masimo SafetyNet™

## Radius PPG™

### Cuidado y actividades diarias

**Advertencia:** No se autodiagnostique ni automedique con base en las mediciones. Siempre consulte a su médico.


Antes de iniciar el **cuidado diario y las actividades**, complete la configuración del sensor y de la aplicación siguiendo las **instrucciones de configuración** incluidas en el kit.

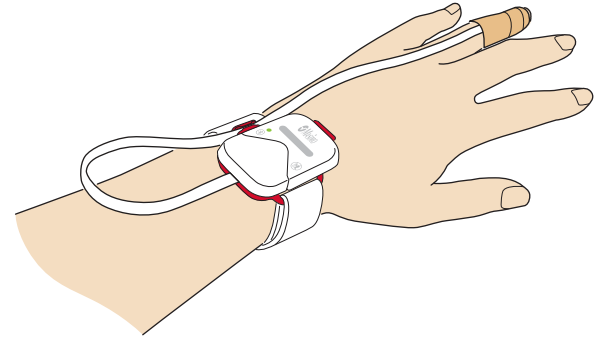

## Tareas diarias en el teléfono


Ejemplo indicado: las pantallas pueden verse distintas

### Iniciar CareProgram™

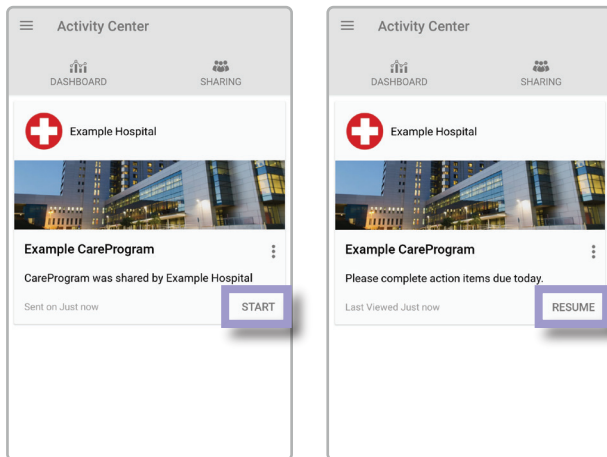

Seleccione "Start" (Iniciar) para comenzar con su CareProgram o "Resume" (Reanudar) para continuar si lo inició en un día anterior.


### Responder preguntas

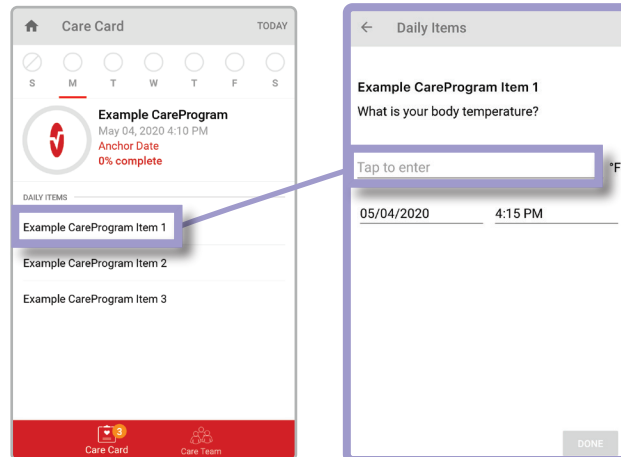

Seleccione todos los elementos listados en "Daily Items" (Elementos diarios) para responder preguntas de su profesional médico.

Responda la pregunta emergente. Repita esto hasta completar todos los "Daily Items" del día.

### Comprobar conexión

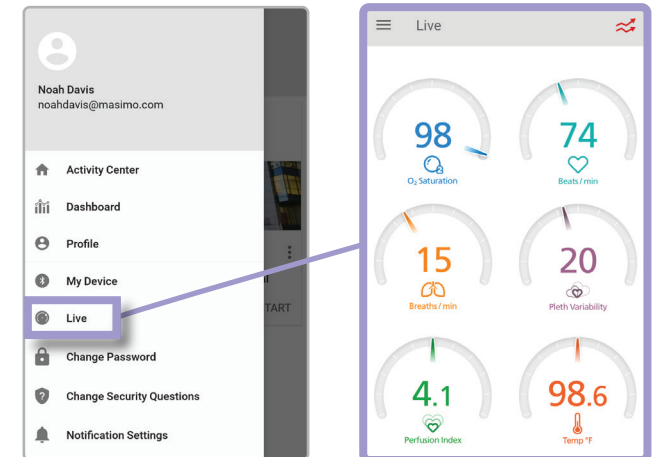


Desde "Activity Center" (Centro de actividades), toque el icono ☰ para abrir el menú. Toque "Live" (En directo) para ver en vivo los datos capturados por el sensor.


Si el sensor está aplicado correctamente y conectado, verá sus datos en directo, acompañados de números.

# Cuidado de los sensores


## Cambio de la cinta del sensor

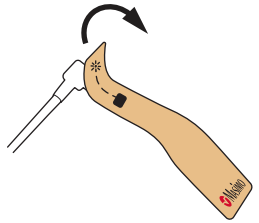


Quite la cinta antigua manteniendo el sensor en su lugar

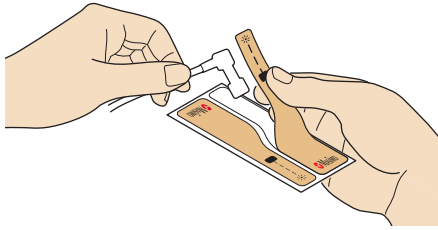

Quite la película del lado adhesivo de la cinta nueva y adhiérala al sensor

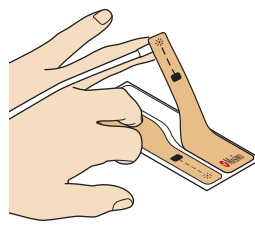


Conecte el sensor al dedo

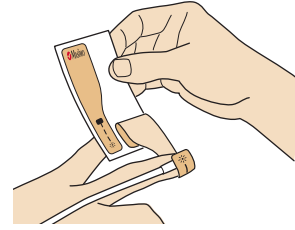

Quite la cinta sobrante de la parte adhesiva


## Revisión de la batería del sensor

Si la luz de la batería es naranja o roja, llegó la hora de cambiar el sensor.

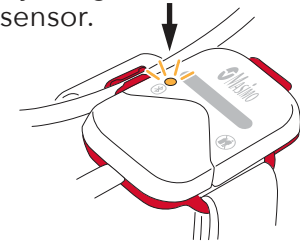

## Cambio del sensor

1. Primero, retire el sensor de la muñeca y el dedo
2. Presione la pestaña roja para retirar el chip de su sensor anterior
3. Siga las indicaciones en la sección "How to Apply Your Sensor" (Cómo aplicar su sensor) en las **Instrucciones de configuración** incluidas en el kit

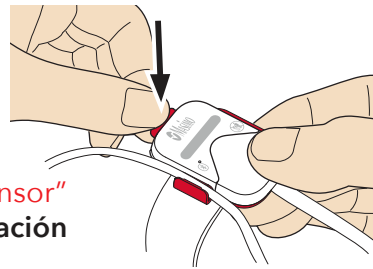

¡Guarde el chip!  
Volverá a usarlo en poco tiempo.

## Otros consejos para el sensor

- Debe retirar el sensor mientras se ducha, pero puede dejarlo puesto mientras se lava las manos.
- Cambie la cinta del sensor una vez al día. Puede cambiársela con mayor frecuencia si la cinta se ensucia, se moja o pierde su adherencia.
- Cargue el sensor si la luz de la batería es naranja o roja.
- Para obtener recursos adicionales, incluidos videos e instrucciones, visite **mymasimo.com**.