

MASIMO SAFETYNET ALERT™

Snabbstartsguide

SYSTEMKOMPONENTER



Masimo Chip™


- Återanvändbart chip som snäpps fast i sensorn och kommunicerar med vårdplatsstationen.



Masimo SafetyNet Alert-appen

- Visar syre, pulsfrekvens och andra data.
- Molnet skickar varningar till vårdplatsstationen och den mobila enheten.
- Kompatibel med de flesta mobila enheter.

(mobil enhet ingår inte)

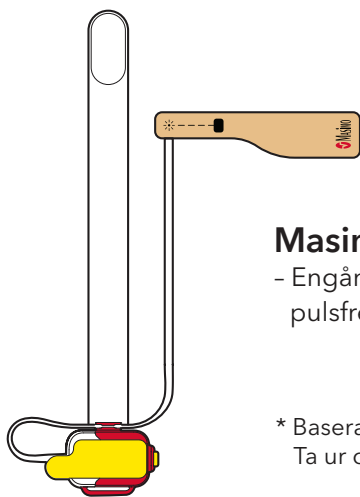

Masimo Sensor™


- Engångssensorn mäter syrenivån och pulsfrekvensen och räcker 7 nätter i följd.*

* Baserat på 96 timmars sensorbatterilivslängd. Ta ur chipet mellan användningstillfällena.



Vårdplatsstation

- Samlar in data från Masimo-sensorn.
- Skickar data till smarttelefonappen.

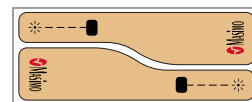

Ersättningstejp


- Ytterligare tejp för byte efter behov.

Konfigurera appen

1. Ladda ned appen.



2. Anslut vårdplatsstationen till ett strömuttag.

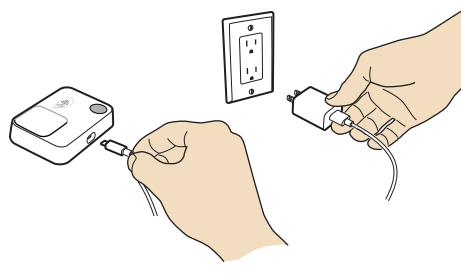

3. Titta efter strömbrytarens lampa.



4. Följ de stegvisa instruktionerna på appen för att konfigurera systemet.




1


Konfigurera sensorn

2


1. Ta ut sensorn ur påsen.

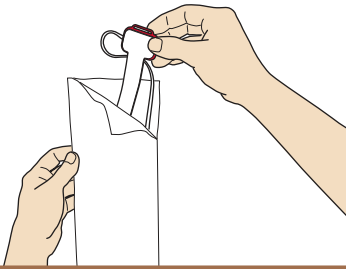


2. Dra bort den gula etiketten för att aktivera batteriet.

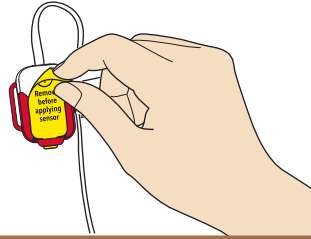

3. Placera sensorn på handleden enligt beskrivningen och trä försiktigt remmens spets genom den öppna röda öglan.

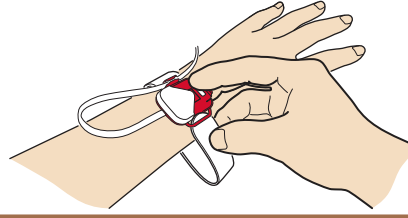


4. Linda den lösa änden av remmen runt handleden och tryck.

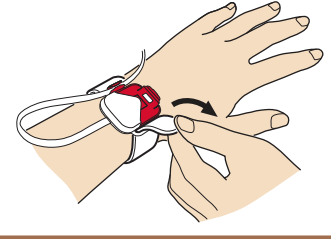

Fäst sensorn

3


1. Lossa en del av skyddsplasten och placera stjärnan (✱) ovanpå ringfingrets nagel.

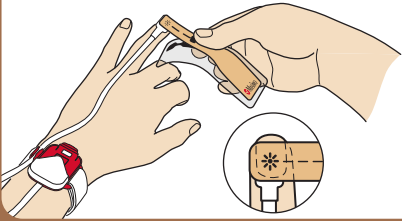


2. Linda tejpens svarta fyrkant (■) hamnar på fingerdynan på motsatt sida från stjärnan (✱).




3. Kläm på fingrets övre och nedre del för att fästa tejpens.

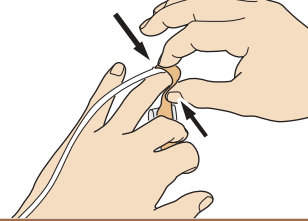

4. Ta bort skyddsplasten och fortsätt linda tejpens runt fingret.

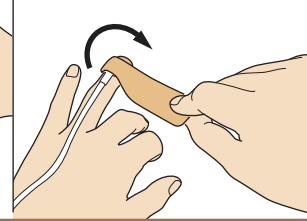


5. Justera kabeln till bekväm längd.

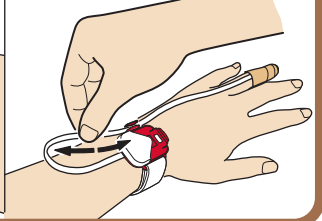


Parkoppla och sätt i chipet

4



1. Håll chipet nära vårdplatsstationen och lyssna efter ett dubbelt pip.

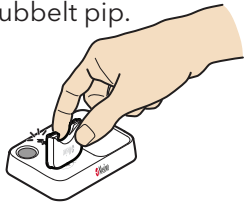


2. Sätt i chipet i sensorns öppna fack.

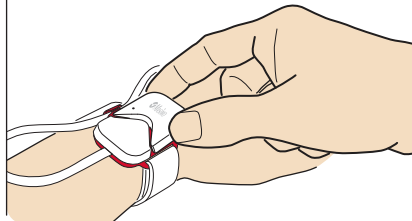

3. Tryck ned chipet så att det sitter fast.

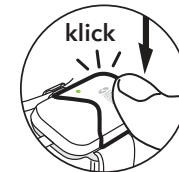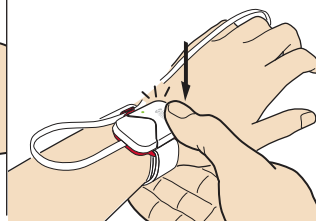

Lyssna efter ett klick för att bekräfta chipets placering.

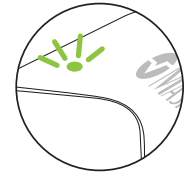


Titta efter lampan för att bekräfta chipets anslutning till sensorn.

Bekräfta lyckad parkoppling

5


1. När chipet har satts i släcks LED-lampan för Bluetooth-status på vårdplatsstationen och LED-lampan för status blir grön. Lampan för chipet lyser med ett fast blått sken.

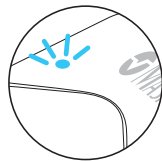


Gå till <http://www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert> för en fullständig lista över enheter som stöds eller för att köpa fler sensorer och se andra resurser, till exempel videofilmer och instruktioner.

Byta ersättningstejpen


1. Dra bort använd tejp från sensorn.

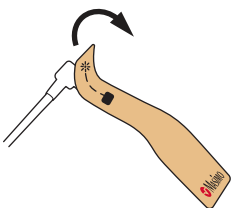

2. Sätt på en ny tejp i samma riktning som den använda tejpens.

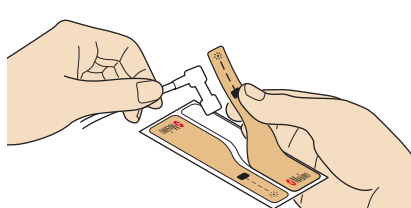

3. Fäst sensorn på fingret.

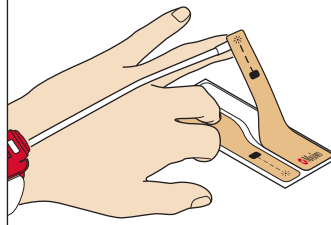

4. Dra bort resten av tejpens.

